



## Sistema EyeGiene® Insta-Warmth™ per il trattamento dell'occhio secco.


Il sistema **EyeGiene®** Insta-Warmth™ (prod. Eyedetec – Usa) si propone di ripristinare lo strato lipidico del film lacrimale, contribuendo ad aumentarne la stabilità nel trattamento di patologie quali occhio secco, disfunzioni ghiandolari di Meibomio, blefariti, calazio e orzaiolo.

Il **kit EyeGiene®** è composto da una mascherina oculare, nella quale vengono inserite delle unità riscaldanti che sviluppano calore terapeutico temporaneo, per il trattamento di patologie quali occhio secco, blefariti, calazi e orzaioli.

Si tratta di un dispositivo pratico e semplice da utilizzare, in quanto non richiede l'impiego di fonti di calore esterne.

Le due unità riscaldanti si attivano non appena viene aperta la bustina sigillata all'interno della quale sono contenute. Una volta inserite le warming units (una per copri-occhio) nella mascherina, la stessa viene indossata dal paziente il quale mantenendo le palpebre chiuse dovrà sedersi e assumere una posizione rilassata per tutta la durata del trattamento.

Il livello di calore terapeutico raggiunto in breve dalle unità riscaldanti all'interno della mascherina viene mantenuto per un tempo di 8-10 minuti, dispiegando in modo naturale effetti benefici sul film lacrimale.

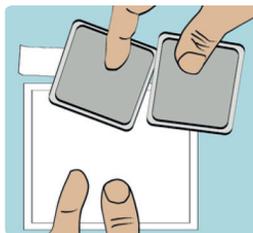


Il kit completo **EyeGiene®** Insta Warmth™ comprende una mascherina riutilizzabile (lavabile) e 10 bustine sigillate, ciascuna delle quali contiene due unità riscaldanti.


Oltre al kit completo, l'assortimento EyeGiene® comprende anche una confezione di "ricariche" da 30 bustine, contenenti ciascuna 2 unità riscaldanti.

**Il sistema EyeGiene® Insta-Warmth™  
è importato in esclusiva per l'Italia da  
New Tech spa.**


### Functional Performance of EyeGiene

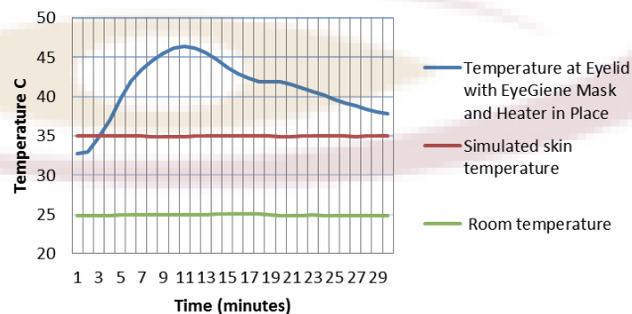

LIPID DEFICIENT TEAR FILM

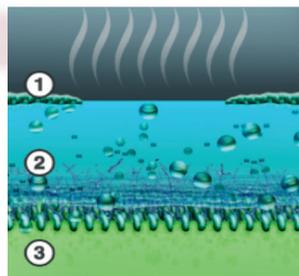

EYEGIEENICALLY RESTORED™ AND STABILIZED

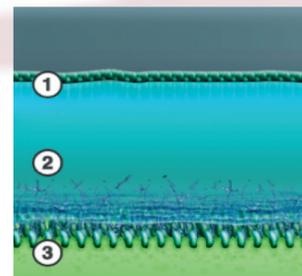

*Trattamento per occhio secco*  
**eyigiene**  
Insta-Warmth System™

Per ulteriori ed approfondite informazioni  
di carattere tecnico-commerciale  
e per eventuali ordini:

**New Tech S.p.A.**

Tel +39 02 27400363 - fax +39 02 27401401

[servizio.clienti@newtechspa.it](mailto:servizio.clienti@newtechspa.it)

<http://www.newtechspa.it>



**Treatment  
for Dry Eyes**